

NARIVENT SPRAY BG

Nome:	NARIVENT SPRAY BG
Codice:	20FG3120
Tipo Carta:	USOMANO 60gr/mq bianco
F.to carta:	150x200 mm.
Piega:	SI finita 25mm
Stampa:	1 colore Blu rflex



2° bozza
del 06-03-2018

narivent®

BG

Спрей за нос против оток

Показания: Медицинско изделие с осмотично действие с противооточен ефект.

Подтиска прогресивното увеличение на възпалителния процес.

Предназначено за намаляване на назалната обструкция при пациенти, страдащи от хипертрофия на конхите на носа и от вазомоторни ринопатии специфични (алергични ринити) или неспецифични.

Подходящо за лечение на оток, свързан със състояния на риносинусални и аденоидални остри и хронични възпаления.

Подходящо за лечение и профилактика на рецидиви след операция на назална полипоза.

Подходящо за преди и след оперативното лечение на риносинусални възпаления.

Състав: Манитол, глицерол, дикалиев глициризинат, съполимер на ПЕГ/ППГ, ЕДТА динатриева сол, натриев н-хидроксиметилглицинат, полисорбат 20, калиев сорбат, натриев хидрат, пречистена вода, естествени аромати.

Начин на употреба: Отстранете предпазната капачка, сложете палеца върху основата на флакона, показалеца и средния пръст върху раменцата му и ги натиснете надолу. После ги отпуснете. Повторете действието, докато стане първото изпръскване. Наведете леко главата напред, издишайте бавно и впръскайте спрея в засегнатата ноздра, вдишайте, държейки другата ноздра запушена с пръста на другата ръка.

При употреба преди операция, да се прилага на пациента само в случай, че е доказана липсата на свръхчувствителност или непоносимост към продукта.

Възрастни и деца: Препоръчват се две впръсквания за ноздра два пъти на ден или по друго лекарско предписание.

Нежелани реакции: Не са наблюдавани нежелани реакции.

Предупреждения:

- Продуктът може временно при първите апликации да предизвика сърбеж в носа и кихане.
- Поради специфичния механизъм на действие на Narivent спрей, същия причинява временна осмотична ринорея след апликацията му.
- В случай на употреба преди операция, да се докаже липсата на свръхчувствителност или непоносимост към продукта.
- Не го използвайте в случай на свръхчувствителност към съставките на продукта.
- В случай на нежелани реакции, спрете употребата на продукта и се консултирайте с лекар.
- Не употребявайте продукта след изтичане на срока на годност, обозначен на опаковката.
- Да се избягва контакт с очите.
- Не го поглъщайте.
- След употреба, затваряйте добре флакона.
- Избягвайте хаотична употреба на продукта.
- След употреба, не изхвърляйте флакона в околната среда.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници и на място, недостъпно за деца.

Медицинско изделие-Директива 93/42/ЕС

20 ml e

Вносител:

Ди Ем Джи България ЕООД
ул.Акад. Георги Бончев
бл.104,вх.А,София, България.
www.dmgbg.com

Произведено в Италия



Via Laurentina, km 26,700 - 00071 Pomezia, Rome
Italy - www.dmgit.com



Проверено 4_20/09/2012

20FG3120 2-06/03/2018